

Таблица 1

Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Анализатор не включается при нажатии кнопки включения	1. Аккумулятор полностью разряжен 2. Аккумулятор неисправен	1. Зарядить аккумулятор 2. Заменить аккумулятор в сервисном центре
Высвечивается ошибка «Err 1»	Аккумулятор разряжен	Зарядить аккумулятор
Высвечивается ошибка «Err 2»	Высокое напряжение на зарядном устройстве	Ремонт зарядного устройства в сервисном центре
Высвечивается ошибка «Err 3»	Низкое напряжение системной батареи	Ремонт анализатора в сервисном центре
Высвечиваются ошибки «Err 4», «Err 5» или «Err 6»	Неисправность электрохимического датчика	Ремонт анализатора в сервисном центре
Высвечивается ошибка «Err 7»	Переполнение памяти	Произвести очистку памяти с помощью программы «PC Talk» или в сервисном центре
Высвечиваются ошибки «Err 8», «Err 9» или «Err 10»	Ошибка калибровки	Провести регулировку чувствительности анализатора
Высвечиваются ошибки «Err 11» или «Err 12»	Датчик давления неисправен	Заменить датчик давления в сервисном центре
Высвечиваются ошибки «Err 13»—«Err 16» или «Err 19»	Ошибки калибровки	Настройка анализатора в сервисном центре
Высвечивается ошибка «Err 17»	Превышение лимита времени до очередной калибровки	Провести регулировку чувствительности анализатора
Высвечивается ошибка «Err 18»	Превышение количества тестов до очередной калибровки	Провести регулировку чувствительности анализатора
Отсутствует прием воздуха при отборе пробы	1. Датчик давления неисправен 2. Низкое напряжение аккумулятора	1. Заменить датчик 2. Зарядить аккумулятор